



REINIGUNGSSCHAUM

**EXTRA
FRISCH**

- **Langanhaltende** Frische
- **Materialschonend**

Für herausnehmbare

- Zahnsparngen
- Zahnprothesen
- Zahnschienen

Der Prokudent Reinigungsschaum ist ideal für die komfortable und **materialschonende** Reinigung zwischendurch. Er enthält keine Schleifpartikel und kann somit mehrmals täglich angewendet werden.

Anwendung

1. Flasche vor Gebrauch gut schütteln
2. Dose gerade oder bis 45° geneigt halten und Schaum auf Prothese/Spange/Schiene auftragen
3. Schaum 1-2 Minuten einwirken lassen
4. Prothese/Spange/Schiene mit einer Zahn- oder Prothesenbürste gründlich abbürsten und
5. mit klarem Wasser Schaum vollständig abspülen
6. Zusätzlich 1x täglich die Prothese/Spange/Schiene mit Prokudent dritte Zähne Reinigungscreme oder Prokudent Gebissreiniger Tabs säubern.

Warnhinweise

- Anwendungshinweise befolgen
- Schaum nur außerhalb des Mundes anwenden
- Augenkontakt meiden
- Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Produkt nicht anwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht

Inhaltsstoffe: AQUA, SORBITOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, SODIUM SACCHARIN, PROPANE, BUTANE, GLYCERYL STEARATE, AROMA, POTASSIUM ACESULFAME, ASPARTAME, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, ISOBUTANE

Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50° C/122° F aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nur vollständig restentleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben. Enthält eine Phenylalaninquelle.

 PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
PS-LAN: ZR0034

HINWEIS:
MEDIZINPRODUKT

Vertrieb durch
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Str. 16
30938 Burgwedel
Germany
www.rossmann.de



Kostenloses Info-Telefon:
0800-76 77 62 66

REV1/2019

