

# Curafit<sup>budni</sup>

MEDIZINPRODUKT

## Wärmepflaster

### Gebrauchsanweisung


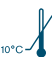
#### Zur schmerzlindernden Wärme-Therapie bei:

- Gelenk- und Muskelschmerzen
- Muskelkater
- Verspannungen
- Rückenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden
- Zerrungen
- Muskelsteifheit

#### Anwendung:

Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten. Öffnen Sie die luftdichte Verpackung mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere, etc.) und entnehmen Sie das Wärmepflaster. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite ab und bringen Sie das Produkt mit dieser Seite auf die schmerzende Stelle auf. Die Erwärmung erfolgt langsam und erreicht nach ca. 30 Minuten die maximale Temperatur, die über mindestens 12 Stunden bestehen bleibt. Die Wärme wird durch die Luft aktiviert, weshalb die luftdichte Verpackung erst unmittelbar vor Benutzung des Wärmepflasters geöffnet werden sollte.

#### Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei rheumatischen Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen, rheumatoider Arthritis, Nervenschäden, Erkrankung der Sinnesfunktionen, Hauterkrankung oder einer Schwangerschaft bitte unbedingt vor der Anwendung an einen Arzt wenden
- Nur zur äußerlichen und zweckmäßigen Anwendung geeignet
- Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist
- Von der Haut sofort entfernen, wenn die Temperatur unangenehm ist
- Nicht zusammen mit schmerzstillenden Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden
-  Wärmepflaster nur einmal benutzen
- Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts, dem Kontakt mit der Haut oder den Augen das Produkt entfernen, den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und vorsorglich umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Inhalt kann bei Verschlucken oder direktem Kontakt mit der Haut schädlich sein.
-  Dauerhafte Lagerung bei Zimmertemperatur
- Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Einzelverpackung
- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen

- Falls nach der Anwendung eine leichte Rötung der Haut auftritt, was normal ist, diese erst abklingen lassen, bevor eine weitere Anwendung durchgeführt wird
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit deshalb über dünner Kleidung tragen

### Warnhinweise:

Bei falscher Anwendung können selbst bei niedriger Temperatur Brandwunden entstehen. Befolgen Sie bitte deshalb die Gebrauchsanweisung und überwachen Sie die Anwendung in regelmäßigen Abständen. Sorgen Sie für eine Zirkulation der Luft über dem Wärmepflaster, um dem Risiko von Brandwundenbildung vorzubeugen. Um keinen Druck auf die behandelnde Stelle zu erzeugen, legen und setzen Sie sich nicht auf das Produkt und tragen Sie keine eng anliegende Kleidung über dem Wärmepflaster. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn es unangenehm heiß wird, sich ein Hautausschlag bildet oder Sie sich nicht wohl fühlen. Personen, die das Wärmepflaster ohne Hilfe nicht eigenständig abnehmen können, z.B. ältere oder behinderte Personen, sollten während der Anwendung sorgfältig überwacht werden. Suchen Sie einen Arzt auf, sofern Ihre Schmerzen nach einwöchiger Anwendung des Produktes nicht gelindert wurden, da dies auf eine Erkrankung hinweisen könnte. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

### Nicht anwenden:

- Länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden
- Bei Kindern unter 12 Jahren
- An einer Stelle mit Entzündungen, Prellungen, Rötungen, Schwellungen, Hautrissen, Blutergüssen, Hautreizungen bzw. überempfindlicher, kranker, verletzter oder geschädigter Haut
- An einer Stelle, an der Sie Wärme nicht wahrnehmen können
- In Verbindung mit medizinischen und kosmetischen Cremes, Mitteln oder Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden
- Wenn Personen das Produkt nicht selbst entfernen können
- Wenn das Produkt beschädigt oder undicht ist
- Während des Schlafens
- Während einer MRT-Untersuchung

### Wärmepflaster niemals:

- Zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder pressen
- In der Mikrowelle oder durch andere äußere Einwirkungen erwärmen
- Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen

### Inhaltsstoffe:

Eisen, destilliertes Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

### Inhalt:



**2 Pflaster, einzeln verpackt**  
à 13 x 9,5 cm

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:

Telefonnr.: +49 2241/2340600 oder E-Mail: [info@product-services.de](mailto:info@product-services.de)



siehe Einzelverpackung



Stand der Information: Juli 2020/REV1

**Vertrieb:**  
BUDNI Warenhandels-gesellschaft mbH,  
22297 Hamburg, [www.budni.de](http://www.budni.de)  
Servicenummer: 040 80 60 30 30

 Koolcare Technology Co.  
Ltd. No. 6-10, A5, Shandong  
International Tech Park  
South Waihuan Road, Linyi  
276017 Shandong, China

**Importeur:**  
PS Product Services GmbH  
Alte Heerstr. 6  
53757 St. Augustin  
Deutschland



Prolix GmbH  
Brehmstr. 56  
40239 Düsseldorf  
Deutschland