

# elkos DentaMax

## SUPER-HAFTCREME

▶LANGER & STARKER HALT ▶POLSTERUNGSEFFEKT ▶KRÜMELSCHUTZ

### MEDIZINPRODUKT

#### HINWEISE:

Bitte alle Hinweise sorgfältig lesen und beachten. Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben. Die Haftcreme außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Tubeninhalte und die Kanüle von Flüssigkeiten fernhalten und nach Gebrauch fest verschließen. Die Tube kühl und trocken aufbewahren. Die Haftcreme nicht verwenden, wenn gegen einen der genannten Inhaltsstoffe eine Überempfindlichkeit vorliegt. Die Faltschachtel zum Nachlesen aufbewahren. Den Sitz der Prothese regelmäßig vom Zahnarzt überprüfen lassen.

#### Schutz und Sicherheit für 3. Zähne

- ▶ Extra starker Halt und Schutz für Voll- und Teilprothesen
- ▶ Mit Polsterungseffekt und Krümel-schutz
- ▶ Mit frischem Minzgeschmack

#### INGREDIENTS:

CELLULOSE GUM, HYDROGENATED POLYDECENE, CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER, HYDROGENATED STYRENE/ISOPREN COPOLYMER, AROMA, LIMONENE, TOCOPHEROL.

PS Product  
Services GmbH  
Alte Heerstr. 6  
D-53757 St. Augustin  
Tel.: 02241/23406-0

Vegan

CE

#### Vertrieb:

EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co KG  
D-22291 Hamburg  
Kontakt: 0800 3335211 oder  
info@edeka.de

PS-LAN:ZR0046

75g e


LOT siehe Falz

Stand der Information : REV1 2022-02-01

#### ANWENDUNG:

- 1 Die Prothese gründlich reinigen und gegebenenfalls mit einer Bürste nacharbeiten.
- 2 Die Prothese vollständig abtrocknen.
- 3 Die Haftcreme in dünnen Streifen oder in Punkten entlang des Prothesenrands auftragen. Dabei ca. 1 cm Abstand vom Rand einhalten.
- 4 Die Prothese einsetzen und für ein paar Sekunden festdrücken. Für ca. 5 Minuten bitte nichts essen oder trinken.

Sollte nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme herausquellen, dann bitte bei der nächsten Anwendung die Menge reduzieren.

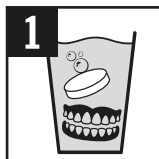

#### TIPP:

Zur Entfernung von Rückständen Tuch in Öl tränken und Prothese reinigen. Nach Gebrauch Tube gut verschließen. Tubenöffnung stets trocken halten. Für Veganer geeignet.

#### AUFBEWAHRUNG:

Tubenöffnung stets trocken halten. Nach Gebrauch Tube gut verschließen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.