

#### ANWENDUNG:

- 1 Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- 2 Halten Sie die Dose gerade oder bis 45 Grad geneigt, um Schaum auf die herausgenommene Prothese/Spange/Schiene aufzutragen
- 3 Lassen Sie den Schaum 1–2 Minuten einwirken
- 4 Bürsten Sie die Prothese/Spange/Schiene mit einer Zahn- oder Prothesenbürste gründlich ab
- 5 Schaum mit klarem Wasser vollständig abspülen
- 6 Zusätzlich 1x täglich mit DontoDent Prothesen-Reinigungs-Creme oder DontoDent Gebissreiniger-Tab's säubern

**WARNHINWEISE:** Anwendungshinweise befolgen. Schaum nur außerhalb des Mundes anwenden. Augenkontakt vermeiden. Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt nicht anwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Enthält Natrium-N-Lauroylsarkosinat.

**INHALTSSTOFFE:** AQUA, PROPANE, BUTANE, GLYCERYL STEARATE, NADIUM LAUROYL SARCOSINATE, AROMA, XANTHAN GUM, NADIUM BENZOATE, ISO-BUTANE, LIMONENE

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nur vollständig restentleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben.



**GEFAHR**

Hersteller: PS Product Services GmbH  
Alte Heersstraße 6, D-53757 Sankt Augustin  
PS-LAN: ZR0044

Vertrieb durch:  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  
Am dm-Platz 1  
DE-76227 Karlsruhe  
Tel. 0800 3658633, www.dm.de

Vertrieb in Österreich:  
dm drogerie markt, AT-5071 Wals  
Tel. 0800 3658633, www.dm.at

UDI-DI: 4050235001941

**125 ml e**

**dm** Markenqualität  
► Hergestellt in Deutschland



175 3

LOT  
siehe Dosen-  
unterseite



MEDIZINPRODUKT  
Stand der Information: 06.04.2022/REV1



## REINIGUNGS- SCHAUM

Für herausnehmbare Zahn-  
schiene, Zahnspangen und  
Zahnprothesen

Lang anhaltende Frische

Sanft und  
materialschonend