

MEDIZINPRODUKT

EDEKA

Kalt-/Warm-Kompresse

- Wärmende Anwendung z.B. bei Verspannungen, Muskelschmerzen, Rücken- und Bauchschmerzen
- Kühlende Anwendung z.B. bei Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen und Fieber
- Wiederverwendbar



1 Kompresse (15,5 cm x 13 cm)

ANWENDUNG:

Kompresse zur äußerlichen Anwendung im privaten Bereich.

Zur Kälte-Therapie bei:

- Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Blutergüssen
- Sonnenstich
- Fieber
- leichten Verbrennungen/ Verbrühungen
- Insektenstichen
- Zahn- und Kopfschmerzen

Die Kompresse für etwa 2 Stunden bei mindestens -15 °C im Gefrierschrank/-fach aufbewahren. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten. Die Anwendung kann nach einer 30 minütigen Pause wiederholt werden.

Zur Wärme-Therapie bei:

- Muskelkater, Muskelschmerzen
- Hexenschuss, Rückenschmerzen
- Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen
- leichten Unterkühlungen
- Verspannungen
- Menstruationsbeschwerden
- Darmträgheit

Die Kompresse für 8 Minuten in maximal +80 °C heißem Wasser erwärmen. Alternativ in einem trockenen Tuch eingeschlagen bei maximal 600 Watt für 15 Sekunden in der Mikrowelle aufwärmen. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Ist die Kompresse noch nicht warm genug, dann erneut im Wasserbad bzw. in 15 Sekunden Intervallen in der Mikrowelle erwärmen. Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten. Die Anwendung kann nach einer 30 minütigen Pause wiederholt werden.

WARNHINWEISE:

- Die Wärmeanwendung nicht bei entzündlichen Prozessen anwenden.
- Zu starkes Erhitzen kann die Kompresse beschädigen und zu Hautverbrennungen führen.
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

VORSICHTSMABNAHMEN:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Nicht verwenden, wenn die Kompresse beschädigt ist.
- Kompresse sofort entfernen, wenn die Temperatur als unangenehm empfunden wird.
- Kompresse nicht zugleich mit schmerzstillenden Medikamenten/ Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden.
- Bei rheumatischen Erkrankungen und Kreislaufbeschwerden bitte vor Anwendung einen Arzt konsultieren.
- Bei versehentlicher Einnahme des Beutelinhalts viel Wasser trinken und vorsorglich einen Arzt konsultieren.
- Die Kompresse kann dauerhaft bei Zimmertemperatur gelagert werden.
- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.
- Die Kompresse nicht mit Lösungsmitteln (z.B. Desinfektionsmittel) reinigen.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG:

Füllung: Wasser, Glycerol, CMC (Natrium Carboxymethylcellulose), Bitterstoffe, Konservierungsstoffe

Hülle des Gelpads: Polyethylen

UDI-DI: 4050235000739
PS-LAN: TS0055


PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

Vertrieb:
BUDNI Warenhandels-gesellschaft mbH
22297 Hamburg, www.budni.de
Servicenummer: 040 80 60 30 30



UDI-DI: 4050235000692
PS-LAN: TS0054


Hersteller:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

Vertrieb:
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
D-22291 Hamburg



EDEKA KUNDENSERVICE:

0800 333 5211 (kostenfrei aus dem dt, Fest- und Mobilfunk-netz) oder info@edeka.de.

Stand der Informationen
2021-07-30/REV1

Curafit^{budni}

MEDIZINPRODUKT

Kalt-/Warm-Kompresse

- Schnelle Hilfe bei Prellungen, Schwellungen und anderen Beschwerden
- Für die Kalt- und Warmanwendung
- Mikrowellengeeignet und wiederverwendbar



1 Kompresse ca. 12 x 29 cm

ANWENDUNG:

Kompresse zur äußerlichen Anwendung für den privaten Gebrauch.

Zur Kälte-Therapie bei:

- Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Blutergüssen
- leichten Verbrennungen/Verbrühungen
- Fieber
- Sonnenstich
- Zahn- und Kopfschmerzen
- Insektenstichen

Zur Wärme-Therapie bei:

- Muskelkater, Muskelschmerzen
- Verspannungen
- Hexenschuss, Rückenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden
- Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen
- Darmträgheit
- leichten Unterkühlungen

Anwendung als Kalt-Kompresse:

Die Kompresse für mindestens 2 Stunden bei mindestens -15°C im Gefrierschrank/-fach aufbewahren. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Die Kompresse anschließend in die Stoffhülle legen, um Kälteschäden vorzubeugen. Nie ohne Stoffhülle oder Tuch anwenden. Die maximale Anwendungszeit beträgt 20–30 Minuten. Die Anwendung kann nach einer 30-minütigen Pause wiederholt werden.

Anwendung als Warm-Kompresse:

Die Kompresse für 8 Minuten in maximal $+80^{\circ}\text{C}$ heißem Wasser erwärmen, alternativ mit einem trockenen Tuch umwickeln und bei maximal 600 Watt für 15 Sekunden in der Mikrowelle aufwärmen. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Ist die Kompresse noch nicht warm genug, dann erneut im Wasserbad bzw. in der Mikrowelle in Intervallen à 15 Sekunden erwärmen. Die Kompresse anschließend in die Stoffhülle legen, um Wärmeschäden vorzubeugen. Nie ohne Stoffhülle oder Tuch anwenden. Die maximale Anwendungszeit beträgt 20–30 Minuten. Die Anwendung kann nach einer 30-minütigen Pause wiederholt werden.

WARNHINWEISE:

- Die Wärmeanwendung nicht bei entzündlichen Prozessen anwenden.
- Zu starkes Erhitzen kann die Kompresse beschädigen und zu Hautverbrennungen führen.
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Nicht verwenden, wenn die Kompresse beschädigt ist.
- Kompresse sofort entfernen, wenn die Temperatur als unangenehm empfunden wird.
- Kompresse nicht zugleich mit schmerzstillenden Medikamenten/ Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden.
- Bei rheumatischen Erkrankungen und Kreislaufbeschwerden bitte vor Anwendung einen Arzt konsultieren.
- Bei versehentlicher Einnahme des Beutelinhalts viel Wasser trinken und vorsorglich einen Arzt konsultieren.
- Die Kompresse kann dauerhaft bei Zimmertemperatur gelagert werden.
- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.
- Die Kompresse nicht mit Lösungsmitteln (z.B. Desinfektionsmittel) reinigen.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG:

Füllung: Wasser, Glycerol, CMC (Natrium Carboxymethylcellulose), Bitterstoffe, Konservierungsstoffe

Hülle des Gelpads: Polyethylen

Stoffhülle: Polyester

PFLEGEHINWEISE:

Die Stoffhülle vor dem ersten Tragen mit der Hand waschen. Jeweils nach 2–3-maligem Tragen erneut waschen.



PS-LAN: TS0056

UDI-DI: 4050235000777



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

Vertrieb:

BUDNI Warenhandels-gesellschaft mbH
22297 Hamburg, www.budni.de
Servicenummer: 040 80 60 30 30

Stand der Information
2021-06-01/REV1

