



PIANKA DO CZYSZCZENIA

WYJĄTKOWA ŚWIEŻOŚĆ

- **długotrwała świeżość**
- **delikatna formuła**

Odpowiednia do wyjmowanych:

- aparatów ortodontycznych
- protez zębowych
- nakładek dentystycznych

Idealnie nadaje się do wygodnego, przyjaznego dla materiałów czyszczenia między nimi. Nie zawiera cząstek ściernych. Aplikacja jest możliwa kilka razy dziennie.

Zastosowanie: 1. Przed użyciem wstrząsnąć butelkę 2. Trzymać pojemnik prosto lub pod kątem 45° i nanieść piankę na protezę/aparat/nakładkę 3. Pozostawić piankę na 1-2 minuty 4. Dokładnie wyszczotkować protezę (ltp.) szczoteczką do zębów lub szczoteczką do protez, a następnie 5. Sptukać całą piankę czystą wodą 6. Dodatkowo raz dziennie czyścić protezę (ltp.) kremem do czyszczenia Prokudent lub tabletkami do czyszczenia protez Prokudent

Ostrzeżenia: • Przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania • Piankę stosować tylko na zewnątrz jamy ustnej • Unikać kontaktu z oczami • Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci • Nie stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników

Składniki: AQUA, SORBITOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, SODIUM SACCHARIN, PROPANE, BUTANE, GLYCERYL STEARATE, AROMA, POTASSIUM ACESULFAME, ASPARTAME, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, ISOBUTANE

Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Do punktu zbiórki surowców wtórnych wrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zawiera źródło fenylolaniny.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

125 ml e

175 3



Patrz spód opakowania

Producent
PS Product
Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
Niemcy

WYRÓB MEDYCZNY

Wyprodukowano w Niemczech.

Wyprodukowano dla:
[Dirk Rossmann GmbH](#)
[Isernhägener Str. 16](#)
[30938 Burgwedel](#)
[Germany](#)
[www.rossmann.de](#)

Dystrybutor:
ROSSMANN SDP Sp. z o.o.,
ul. św. Teresy 109,
91-222 Łódź,
[www.rossmann.pl](#)

UDI-DI: 4050235000661

REV1/2021

PS-LAN: ZR0041

ROSSMANN