

SOPHIE



GEBRAUCHSANWEISUNG – INFORMATIONEN FÜR DEN ANWENDER MENSTRUATIONS-WÄRMEPFLASTER

VOLL WARM

Medizinprodukt

ZUR SCHMERZLINDERNDEN WÄRME-THERAPIE BEI:





- Menstruationsbeschwerden

Auch für andere Körperpartien einsetzbar: Das Wärmepflaster kann auch bei Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen, Rückenschmerzen, Zerrungen oder Muskelsteifheit angewendet werden.

ANWENDUNG:

Die Haut an der Anwendungsstelle muss trocken und sauber sein. Das Einzelstück mit der Hand öffnen (nicht einschneiden) und das Wärmepflaster entnehmen. Die Schutzfolie von der Rückseite des Pflasters abziehen und das Wärmepflaster mit der Klebeseite direkt auf die Haut über der schmerzhaften Stelle oder auf die Innenseite des Slips kleben. Das Wärmepflaster wärmt sich langsam auf und erreicht innerhalb von ungefähr 30 Minuten seine Höchsttemperatur. Die Wärme wird von der Luft aktiviert – das Einzelstück sollte daher erst geöffnet werden, wenn das Wärmepflaster benutzt werden soll.

VORSICHTSMABNAHMEN:

- Bei rheumatischen Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen, rheumatoider Arthritis, Nervenschäden, Erkrankung der Sinnesfunktionen, Hauterkrankung oder einer Schwangerschaft bitte unbedingt vor der Anwendung an einen Arzt wenden.
- Nur zur äußerlichen und zweckmäßigen Anwendung geeignet.
- Für Kinder und Haustiere unzugänglich machen.
-  Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Von der Haut sofort entfernen, wenn die Temperatur unangenehm ist.
- Nicht zusammen mit schmerzstillenden Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden.
-  Wärmepflaster nur einmal benutzen.
- Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts, dem Kontakt mit der Haut oder den Augen das Produkt entfernen, den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und vorsorglich umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Inhalt kann bei Verschlucken oder direktem Kontakt mit der Haut schädlich sein.
-  Dauerhafte Lagerung bei Zimmertemperatur.
-  Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Einzelverpackung.
- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.

- Falls nach der Anwendung eine leichte Rötung der Haut auftritt, was normal ist, diese erst abklingen lassen, bevor eine weitere Anwendung durchgeführt wird.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit deshalb über dünner Kleidung tragen.

WARNHINWEISE:

Bei falscher Anwendung können selbst bei niedriger Temperatur Brandwunden entstehen. Befolgen Sie bitte deshalb die Gebrauchsanweisung und überwachen Sie die Anwendung in regelmäßigen Abständen. Sorgen Sie für eine Zirkulation der Luft über dem Wärmepflaster, um dem Risiko von Brandwundenbildung vorzubeugen. Um keinen Druck auf die behandelnde Stelle zu erzeugen, legen und setzen Sie sich nicht auf das Produkt und tragen Sie keine eng anliegende Kleidung über dem Wärmepflaster. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn es unangenehm heiß wird, sich ein Hautausschlag bildet oder Sie sich nicht wohl fühlen. Personen, die das Wärmepflaster ohne Hilfe nicht eigenständig abnehmen können, z.B. ältere oder behinderte Personen, sollten während der Anwendung sorgfältig überwacht werden. Suchen Sie einen Arzt auf, sofern Ihre Schmerzen nach einwöchiger Anwendung des Produktes nicht gelindert wurden, da dies auf eine Erkrankung hinweisen könnte. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Nicht anwenden:

- Länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden
- Bei Kindern unter 12 Jahren
- An einer Stelle mit Entzündungen, Prellungen, Rötungen, Schwellungen, Hautrissen, Blutergüssen, Hautreizungen bzw. überempfindlicher, kranker, verletzter oder geschädigter Haut
- An einer Stelle, an der Sie Wärme nicht wahrnehmen können
- In Verbindung mit medizinischen und kosmetischen Cremes, Mitteln oder Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden
- Wenn Personen das Produkt nicht selbst entfernen können
- Wenn das Produkt beschädigt oder undicht ist
- Während des Schlafens
- Während einer MRT-Untersuchung

Wärmepflaster niemals:

- Zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder pressen
- In der Mikrowelle oder durch andere äußere Einwirkungen erwärmen
- Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen

INHALTSSTOFFE:

Eisen, destilliertes Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

INHALT:

2x Menstruations-Wärmepflaster (einzeln verpackt à 20x10cm)

**Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu ihrer Verfügung:
Telefonnr.: +49 2241/2340600 oder E-Mail: info@product-services.de**



siehe Einzelverpackung



Stand der Information:
Februar 2021/REV1



Vertrieb:
EUUCO GmbH
D-22291 Hamburg
5263275



Koolcare Technology Co. Ltd.
No. 6-10, A5, Shandong
International Tech Park
South Waihuan Road, Linyi
276017 Shandong, China

Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstr. 6
53757 St. Augustin
Deutschland

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56
40239 Düsseldorf
Deutschland