

REINIGUNGSSCHAUM

- > FÜR HERAUSNEHMBARE ZAHNSPANGEN, ZAHNSCHIENEN UND ZAHNPROTHESEN
- > LANGANHALTENDE FRISCHE UND SAUBERKEIT
- > SANFTE UND MATERIALSCHONENDE REINIGUNG
- > MEHRMALS TÄGLICH ANWENDBAR

Der **diadent** Reinigungsschaum ist ideal für die komfortable und **materialschonende** Reinigung zwischendurch. Er enthält keine Schleifpartikel und kann somit mehrmals täglich angewendet werden.

Anwendung

1. Flasche vor Gebrauch gut schütteln
2. Dose gerade oder bis 45° geneigt halten und Schaum auf Prothese / Spange / Schiene auftragen
3. Schaum 1-2 Minuten einwirken lassen
4. Prothese / Spange / Schiene mit einer Zahn- oder Prothesenbürste gründlich abbürsten und mit klarem Wasser Schaum vollständig abspülen
5. Zusätzlich 1x täglich die Prothese / Spange / Schiene mit Prokudent dritte Zähne Reinigungscreme oder Prokudent Gebissreiner Tabs säubern.

Warnhinweise

Zur Anwendung die Hinweise befolgen und Augenkontakt meiden. Den Schaum nur außerhalb des Mundes anwenden. **Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.** Den Reinigungsschaum nicht anwenden, wenn gegen einen der genannten Inhaltsstoffe eine Überempfindlichkeit vorliegt.

Inhaltsstoffe: AQUA, PROPANE, BUTANE, GLYCERYL STEARATE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, AROMA, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, ISOBUTANE, LIMONENE.

Gefahr: Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nur vollständig restentleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben.

 PS Product
Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
PS-LAN: ZR0036



HINWEIS:
MEDIZINPRODUKT

Vertrieb:
EUCO GmbH, D-22291 Hamburg,
Kontakt: 0800 333 5255

REV1/2020

