



Wärmepflaster

Medizinprodukt

- Unkomplizierte und rasche Hilfe zur Linderung von Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden und Zerrungen
- Selbsterwärmend
- Langanhaltende, gleichmäßige und wohltuende Wärme bis zu 12 Stunden
- Tiefenwirksam und entspannend

Inhalt

- **Wärmepflaster:** 2 Stück (ca. 13 x 9,5 cm) zur einmaligen Anwendung

Zur lindernden Wärme-Therapie bei

- Gelenk- und Muskelschmerzen
- Muskelkater
- Verspannungen
- Rückenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden
- Zerrungen
- Muskelsteifheit

Anwendung

Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten. Öffnen Sie die luftdichte Verpackung mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) und entnehmen Sie das **Wärmepflaster**.

Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite ab und bringen Sie das Produkt mit dieser Seite auf die schmerzende Stelle auf. Die Erwärmung erfolgt langsam und erreicht nach ca. 30 Minuten die maximale Temperatur, die über mindestens 12 Stunden bestehen bleibt. Die Wärme wird durch die Luft aktiviert, weshalb die luftdichte Verpackung erst unmittelbar vor Benutzung des **Wärmepflasters** geöffnet werden sollte.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bei rheumatischen Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen, rheumatoider Arthritis, Nervenschäden, Erkrankung der Sinnesfunktionen, Hauterkrankung oder einer Schwangerschaft bitte unbedingt vor der Anwendung an einen Arzt wenden
- Nur zur äußerlichen und zweckmäßigen Anwendung geeignet
- Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist
- Von der Haut sofort entfernen, wenn die Temperatur unangenehm ist
- Nicht zusammen mit schmerzstillenden Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden
-  **Wärmepflaster** nur einmal benutzen
- Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts, dem Kontakt mit der Haut oder den Augen das Produkt entfernen, den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und vorsorglich umgehend einen Arzt aufsuchen. Der Inhalt kann bei Verschlucken oder direktem Kontakt mit der Haut schädlich sein.

Hersteller

 Koolcare Technology Co., Ltd.
No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, 276017, China
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18, Zhenbei Road,
Xinyi, 221400, Jianguo, China

Vertrieb durch

PS Product Services GmbH
Alte Heerstr. 6
D-53757 St. Augustin

EC REP

 Prolinx GmbH
Brehmstraße 56
40239 Düsseldorf, Germany

-  Dauerhafte Lagerung bei Zimmertemperatur
-  Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer siehe Einzelpackung
- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen
- Falls nach der Anwendung eine leichte Rötung der Haut auftritt, was normal ist, diese erst abklingen lassen, bevor eine weitere Anwendung durchgeführt wird.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. **Wärmepflaster** bei entsprechender Empfindlichkeit deshalb über dünner Kleidung tragen.

Warnhinweise

 Bei falscher Anwendung können selbst bei niedriger Temperatur Brandwunden entstehen. Befolgen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und überwachen Sie die Anwendung in regelmäßigen Abständen. Sorgen Sie für eine Zirkulation der Luft über dem **Wärmepflaster**, um dem Risiko von Brandwundenbildung vorzubeugen. Um keinen Druck auf die behandelnde Stelle zu erzeugen, legen und setzen Sie sich nicht auf das Produkt und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem **Wärmepflaster**. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn es unangenehm heiß wird, sich ein Hautausschlag bildet oder Sie sich nicht wohl fühlen. Personen, die das **Wärmepflaster** ohne Hilfe nicht eigenständig abnehmen können, z.B. ältere oder behinderte Personen, sollten während der Anwendung sorgfältig überwacht werden. Suchen Sie einen Arzt auf, sofern Ihre Schmerzen nach einwöchiger Anwendung des Produktes nicht gelindert wurden, da dies auf eine Erkrankung hinweisen könnte.

Nicht anwenden:

- Länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden
- Bei Kindern unter 12 Jahren
- An einer Stelle mit Entzündungen, Prellungen, Rötungen, Schwellungen, Hautrissen, Blutergüssen, Hautreizungen bzw. überempfindlicher, kranker, verletzter oder geschädigter Haut
- An einer Stelle, an der Sie Wärme nicht wahrnehmen können
- In Verbindung mit medizinischen und kosmetischen Cremes, Mitteln, Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden
- Wenn Personen das Produkt nicht selbst entfernen können
-  Wenn das Produkt beschädigt oder undicht ist
- Während des Schlafens
- Während einer MRT-Untersuchung

Wärmepflaster niemals:

- Zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten, pressen
- In der Mikrowelle oder durch andere äußere Einwirkungen erwärmen
- Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen

Inhaltsstoffe

Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:
Telefonnr.: +49 2241 2340600
E-Mail: info@product-services.de