

KREM MOCUJĄCY DO PROTEZ ZĘBOWYCH

Extra mocny

- 0% parabenów
- 0% cynku
- 0% barwnika
- z witaminą E

Swoboda jedzenia, rozmowy i uśmiechu
dzięki niezawodnej sile mocowania!

- Zapobieganie przedostawaniu się resztek pokarmu pod protezę
- Świeży smak mięty
- Efekt poduszki celem zapewnienia podwyższonego komfortu użytkowania

Sposób użycia:

- Wymyć dokładnie protezę, np. przy użyciu tabletek eurodont do intensywnego czyszczenia protez zębowych i całkowicie wysuszyć.
- Nakładać krem mocujący punktowo lub cienkim paskiem niezbyt blisko krawędzi protezy (ok. 1,25g = pasek o długości ok. 7 cm przy jednym zastosowaniu).
- Włożyć protezę do ust i docisnąć ją mocno przez parę sekund i przez ok. 5 minut nic nie jeść i nie pić.
- Jeśli po założeniu protezy krem mocujący wydostaje się spod niej, to podczas następnego zastosowania należy zmniejszyć ilość kremu.

Regularnie kontrolować prawidłowe ułożenie protezy u stomatologa.

Wskazówki:

- Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania.
- Zawartość tubki trzymać z dala od płynów a rurkę aplikacyjną tubki utrzymywać zawsze w stanie czystym i suchym.
- Po użyciu tubkę dokładnie zamknąć.
- Tubkę przechowywać w chłodnym i suchym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie używać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie aplikować bezpośrednio do ust.
- Zachować opakowanie do ponownego przeczytania.

Ingredients:

Cellulose Gum, Hydrogenated Polydecene, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Styrene/Isopren Copolymer, Aroma, Tocopherol, Limonene

WYRÓB MEDYCZNY

Wyprodukowano
w Niemczech



Producent:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
Niemcy
Tel. +49 2241-23406-0

REV1 2021-09-01

Product ID: ZR0042

