

Curafit^{budni}

MEDIZINPRODUKT

Kniegelenk- Bandage

beidseitig tragbar

- Zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks und der Kniescheibe
- Zur Rehabilitation und zur Prophylaxe bei Sehnenansatzschmerzen.
- Anatomische Passform für hohen Tragekomfort und optimalen Sitz
- Atmungsaktives Material

Umfang oberhalb vom Knie ca. 43-52 cm
Umfang unterhalb vom Knie ca. 32-39 cm

Größe
M

Die Curafit Kniegelenk-Bandage stützt, schont und entlastet bei leichten Gelenkinstabilitäten, Reizzuständen, Überlastungsschmerzen, Verstauchungen und Prellungen. Sie unterstützt die Rückkehr zu einem normalen Bewegungsablauf. Die Bandage mit herausnehmbaren Stabilisierungsschienen schränkt die Bewegungsfreiheit des Kniegelenks sanft ein und vermindert dadurch Überlastungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG (bitte aufbewahren):

Zuerst die beiden Schienen in die innenliegenden Taschen einsetzen und bis zum Ende durchschieben.

Bandage mit der größeren Öffnung zuerst über das Bein ziehen, so dass der blaue Mittelteil mit der Gel-Einlage auf der Kniescheibe sitzt.

Nach max. 2 Stunden die Bandage wieder entfernen.

HINWEISE:

Wenn Probleme beim Tragen auftreten, die Bandage sofort entfernen und einen Arzt kontaktieren. Immer auf einen festen aber nicht zu strammen Sitz achten. Die Blutzufuhr darf dabei nicht eingeschränkt werden. Bei Unsicherheiten einen Arzt hierzu befragen. Die Bandage vor Anwendung auf Unversehrtheit prüfen. Bei Defekten oder altersbedingter Materialermüdung kann die benötigte Stabilisierung nicht gewährleistet werden. Die Bandage deshalb nur in einwandfreiem Zustand verwenden. Sie sollte nicht während des Schlafens getragen werden, da eine eingeschränkte Blutzufuhr dann nicht wahrgenommen werden kann. Die Bandage max. 2 Stunden ohne Unterbrechung und nicht länger als 6 Stunden täglich tragen. Produkt und Verpackung von Kleinkindern fernhalten. Es besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.

Nicht - oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt - anwenden bei äußeren Verletzungen, Durchblutungsstörungen, Wassereinlagerungen (Ödem), Ekzemen und anderen Hauterkrankungen, komplexen Bandinstabilitäten und bei komplexen regionalen Schmerzsyndromen.

Ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet. Hautfreundliches Material.

WARNHINWEISE:

In Einzelfällen kann es zu **Hautreizungen und Hautirritationen** kommen! Die von der Bandage bedeckte Stelle regelmäßig reinigen, um Hautreizungen zu vermeiden. Vor dem Gebrauch keine Salben, Cremes, Öle, Fette etc. an der Anwendungsstelle verwenden. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

MATERIAL:

Obermaterial: Polyamid, Elastan, Baumwoll-Webstoff Innen: Elastodien, Gelpad

PFLEGEHINWEISE:

Die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen waschen. Entfernen Sie die Stabilisierungsschienen vor dem Waschen aus der Bandage und setzen Sie diese nach dem Trocknen wieder ein. Schonwaschgang. Nur mit gleichen Farben waschen. Nicht im Trockner sondern an der Luft trocknen lassen. Trocknen und bei Raumtemperatur lagern.



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

PS-LAN: SP0134
Stand der Information
REV1 2023-04-01



UDI-DI: 4050235002962

Vertrieb:

BUDNI
Warenhandels-
gesellschaft mbH,
22297 Hamburg
www.budni.de
Servicenummer:
040 80 60 30 30

Curafit^{budni}

MEDIZINPRODUKT

Handgelenk- Bandage

beidseitig tragbar

- Zur Stabilisierung und Entlastung des Handgelenks
- Zur Rehabilitation und zur Prophylaxe bei Sehnenansatzschmerzen.
- Anatomische Passform für hohen Tragekomfort und optimalen Sitz
- Mit Klettband zum einfachen Fixieren

individuell anpassbar für
Handgelenksumfang von ca. 15-19 cm

Einheits-
größe

Die Curafit Handgelenk-Bandage stützt, schont und entlastet bei leichten Gelenkinstabilitäten, Reizzuständen, Überlastungsschmerzen, Zerrungen, Verstauchungen und Prellungen. Sie unterstützt die Rückkehr zu einem normalen Bewegungsablauf. Die Bandage mit herausnehmbarer Stabilisierungsschiene schränkt die Bewegungsfreiheit des Handgelenks sanft ein und vermindert dadurch Überlastungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG (bitte aufbewahren):

Bandage über das Handgelenk ziehen, so dass nur der Daumen durch die dafür vorgesehene Aussparung ragt, die restlichen Finger von der Bandage umschlossen werden und die Stabilisierungsschiene sich auf der Handinnen-seite befindet. Anschließend die Klettverschlüsse so schließen, dass die Bandage fest sitzt aber nicht einschnürt und die Blutzufuhr nicht beeinträchtigt wird. Nach max. 2 Stunden die Bandage wieder entfernen.

HINWEISE:

Wenn Probleme beim Tragen auftreten, die Bandage sofort entfernen und einen Arzt kontaktieren. Immer für einen festen aber nicht zu strammen Sitz sorgen. Die Blutzufuhr darf dabei nicht eingeschränkt werden. Bei Unsicherheiten einen Arzt hierzu befragen. Die Bandage vor Anwendung auf Unversehrtheit prüfen. Bei Defekten oder altersbedingter Materialermüdung kann die benötigte Stabilisierung nicht gewährleistet werden. Die Bandage deshalb nur in einwand-freiem Zustand verwenden. Sie sollte nicht während des Schlafens getragen werden, da eine eingeschränkte Blutzufuhr dann nicht wahrgenommen werden kann. Die Bandage max. 2 Stunden ohne Unterbrechung und nicht länger als 6 Stunden täglich tragen. Produkt und Verpackung von Kleinkindern fernhalten. Es besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.

Nicht - oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt - anwenden bei äußeren Verletzungen, Durchblutungsstörungen, Wassereinlagerungen (Ödem), Ekzemen und anderen Hauterkrankungen, komplexen Bandinstabilitäten und bei komple-xen regionalen Schmerzsyndromen.

Ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet. Hautfreundliches Material.

WARNHINWEISE:

In Einzelfällen kann es zu **Hautreizungen und Hautirritationen** kommen! Die von der Bandage bedeckte Stelle regelmäßig reinigen, um Hautreizungen zu vermeiden. Vor dem Gebrauch keine Salben, Cremes, Öle, Fette etc. an der Anwendungsstelle verwenden. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

MATERIAL:

Obermaterial: Polyamid, Schaum: SBR-Neopren

PFLEGEHINWEISE:

Die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen waschen. Entfernen Sie die Stabilisierungsschiene vor dem Waschen aus der Bandage und setzen Sie diese nach dem Trocknen wieder ein. Schonwaschgang. Nur mit gleichen Farben waschen. Nicht im Trockner sondern an der Luft trocknen lassen. Trocknen und bei Raumtemperatur lagern.



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

PS-LAN: SP0132
Stand der Information
REV1 2023-04-01



UDI-DI: 4050235002887

Vertrieb:

BUDNI
Warenhandels-
gesellschaft mbH,
22297 Hamburg
www.budni.de
Servicenummer:
040 80 60 30 30

Curafit^{budni}

MEDIZINPRODUKT

Fußgelenk-Bandage

beidseitig tragbar

- Zur Stabilisierung und Entlastung schwacher oder schmerzender Fußgelenke
- Anatomische Passform für hohen Tragekomfort und optimalen Sitz
- Atmungsaktives Material

Größe
M

Fesselumfang ca. 20-24 cm

Zur Rehabilitation und zur Prophylaxe bei Sehnenansatzschmerzen.

Die Curafit Fußgelenk-Bandage stützt, schont und entlastet bei leichten Gelenkinstabilitäten, Reizzuständen, Überlastungsschmerzen, Zerrungen, Verstauchungen und Prellungen. Sie unterstützt die Rückkehr zu einem normalen Bewegungsablauf. Die Gel-Einlage sorgt für zusätzliche Stabilisierung des Fußgelenks.

GEBRAUCHSANWEISUNG (bitte aufbewahren):

Bandage mit der größeren Öffnung zuerst über den Fuß ziehen, so dass der blaue Mittelteil auf der Ferse sitzt und die Gel-Einlagen von links und rechts das Fußgelenk stabilisieren.

Nach max. 2 Stunden die Bandage wieder entfernen.

HINWEISE:

Wenn Probleme beim Tragen auftreten, die Bandage sofort entfernen und einen Arzt kontaktieren. Immer auf einen festen aber nicht zu strammen Sitz achten. Die Blutzufuhr darf dabei nicht eingeschränkt werden. Bei Unsicherheiten einen Arzt hierzu befragen. Die Bandage vor Anwendung auf Unversehrtheit prüfen. Bei Defekten oder altersbedingter Materialermüdung kann die benötigte Stabilisierung nicht gewährleistet werden. Die Bandage deshalb nur in einwandfreiem Zustand verwenden. Sie sollte nicht während des Schlafens getragen werden, da eine eingeschränkte Blutzufuhr dann nicht wahrgenommen werden kann. Die Bandage max. 2 Stunden ohne Unterbrechung und nicht länger als 6 Stunden täglich tragen. Produkt und Verpackung von Kleinkindern fernhalten. Es besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.

Nicht - oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt - anwenden bei äußeren Verletzungen, Durchblutungsstörungen, Wassereinlagerungen (Ödem), Ekzemen und anderen Hauterkrankungen, komplexen Bandinstabilitäten und bei komplexen regionalen Schmerzsyndromen.

Ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet. Hautfreundliches Material.

WARNHINWEISE:

In Einzelfällen kann es zu **Hautreizungen und Hautirritationen** kommen! Die von der Bandage bedeckte Stelle regelmäßig reinigen, um Hautreizungen zu vermeiden. Vor dem Gebrauch keine Salben, Cremes, Öle, Fette etc. an der Anwendungsstelle verwenden. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

MATERIAL:

Obermaterial: Polyamid, Elastan, Baumwoll-Webstoff
Innen: Elastodien, Gelpad

PFLEGEHINWEISE:

Die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen waschen. Schonwaschgang. Nur mit gleichen Farben waschen. Nicht im Trockner sondern an der Luft trocknen lassen. Trocknen und bei Raumtemperatur lagern.



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

PS-LAN: SP0133
Stand der Information
REV1 2023-04-01



UDI-DI: 4050235002924

Vertrieb:

BUDNI
Warenhandels-
gesellschaft mbH,
22297 Hamburg
www.budni.de
Servicenummer:
040 80 60 30 30

Curafit^{budni}

MEDIZINPRODUKT

Ellenbogen- Bandage

beidseitig tragbar

- Zur Stabilisierung und Entlastung schmerzender Ellenbogen
- Anatomische Passform für hohen Tragekomfort und optimalen Sitz
- Atmungsaktives Material

Unterarmumfang ca. 23-27 cm

Größe

M

Zur Rehabilitation und zur Prophylaxe bei Sehnenansatzschmerzen.

Die Curafit Ellenbogen-Bandage stützt, schont und entlastet bei leichten Gelenkinstabilitäten, Reizzuständen, Überlastungsschmerzen, Zerrungen, Verstauchungen und Prellungen. Sie unterstützt die Rückkehr zu einem normalen Bewegungsablauf. Die Bandage schränkt die Bewegungsfreiheit des Ellenbogengelenks sanft ein und vermindert dadurch Überlastungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG (bitte aufbewahren):

Bandage mit der größeren Öffnung zuerst über den Arm ziehen, so dass der blaue Mittelteil auf dem Ellenbogen sitzt.

Nach max. 2 Stunden die Bandage wieder entfernen.

HINWEISE:

Wenn Probleme beim Tragen auftreten, die Bandage sofort entfernen und einen Arzt kontaktieren. Immer auf einen festen aber nicht zu strammen Sitz achten. Die Blutzufuhr darf dabei nicht eingeschränkt werden. Bei Unsicherheiten einen Arzt hierzu befragen. Die Bandage vor Anwendung auf Unversehrtheit prüfen. Bei Defekten oder altersbedingter Materialermüdung kann die benötigte Stabilisierung nicht gewährleistet werden. Die Bandage deshalb nur in einwandfreiem Zustand verwenden. Sie sollte nicht während des Schlafens getragen werden, da eine eingeschränkte Blutzufuhr dann nicht wahrgenommen werden kann. Die Bandage max. 2 Stunden ohne Unterbrechung und nicht länger als 6 Stunden täglich tragen. Produkt und Verpackung von Kleinkindern fernhalten. Es besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.

Nicht – oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt – anwenden bei äußeren Verletzungen, Durchblutungsstörungen, Wassereinlagerungen (Ödem), Ekzemen und anderen Hauterkrankungen, komplexen Bandinstabilitäten und bei komplexen regionalen Schmerzsyndromen.

Ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet. Hautfreundliches Material.

WARNHINWEISE:

In Einzelfällen kann es zu **Hautreizungen und Hautirritationen** kommen! Die von der Bandage bedeckte Stelle regelmäßig reinigen, um Hautreizungen zu vermeiden. Vor dem Gebrauch keine Salben, Cremes, Öle, Fette etc. an der Anwendungsstelle verwenden. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

MATERIAL:

Obermaterial: Polyamid, Elastan, Baumwoll-Webstoff
Innen: Elastodien, Gelpad

PFLEGEHINWEISE:

Die Bandage vor der ersten und jeweils nach 2-3 Anwendungen waschen. Schonwaschgang. Nur mit gleichen Farben waschen. Nicht im Trockner sondern an der Luft trocknen lassen. Trocknen und bei Raumtemperatur lagern.



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin

PS-LAN: SP0135
Stand der Information
REV1 2023-04-01



UDI-DI: 4050235003006

Vertrieb:

BUDNI
Warenhandels-
gesellschaft mbH,
22297 Hamburg
www.budni.de
Servicenummer:
040 80 60 30 30