



Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

## Wärmegürtel – Gebrauchsanweisung:

### Medizinprodukt

- Einfache und schnelle Hilfe zur Linderung von Rückenschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen und Zerrungen
- selbsterwärmend
- langanhaltende, gleichmäßige und wohltuende Wärme bis zu 12 Stunden lang
- tiefenwirksam und entspannend

### Inhalt:

- 2 Stück Wärmegürtel zur zweimaligen Anwendung
- 8 Stück Wärmepads zur einmaligen Anwendung

### Zur lindernden Wärme-Therapie bei:

- Rückenschmerzen
- Gelenk- und Muskelschmerzen
- Muskelkater
- Verspannungen
- Menstruationsbeschwerden
- Zerrungen
- Muskelsteifheit

### Anwendung:

Säubern und trocknen Sie die Haut an der Anwendungsstelle. Öffnen Sie die luftdichte Verpackung von 2 Wärmepads mit den Händen (nicht mit Messer oder Schere etc.) und entnehmen Sie das Wärmepad. Legen Sie je ein Wärmepad in beide Taschen des Gürtels. Legen Sie den Gürtel an und fixieren ihn mit der Wärmeplatte auf der schmerzenden Stelle, in dem Sie den Verschluss schließen. Die Erwärmung erfolgt langsam und erreicht nach ca. 30 Minuten die maximale Temperatur, die über mindestens 12 Stunden bestehen bleibt. Die Wärme wird durch die Luft aktiviert, weshalb die luftdichte Verpackung erst unmittelbar vor Benutzung des Wärmegürtels geöffnet werden sollte. Nach der Anwendung die Wärmepads entnehmen und den Gürtel für die nächste Anwendung behalten.

### Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei rheumatischen Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen, rheumatoider Arthritis, Nervenschäden, Erkrankung der Sinnesfunktionen, Hauterkrankung oder einer Schwangerschaft **bitte unbedingt vor der Anwendung an einen Arzt wenden**
- Nur zur äußerlichen und zweckmäßigen Anwendung geeignet
- Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist
- Von der Haut sofort entfernen, wenn die Temperatur unangenehm ist
- Nicht zusammen mit schmerzstillenden Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden

- Wärmepads nur einmal benutzen



- Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts, dem Kontakt mit der Haut oder den Augen das Produkt entfernen, den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und vorsorglich umgehend einen Arzt aufsuchen. **Der Inhalt kann bei Verschlucken oder direktem Kontakt mit Augen und Haut schädlich sein.**

- Dauerhafte Lagerung bei Zimmertemperatur



- Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Einzelverpackung



- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.
- Falls nach der Anwendung eine leichte Rötung der Haut auftritt, was normal ist, diese erst abklingen lassen, bevor eine weitere Anwendung durchgeführt wird.
- Ab dem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmegürtel deshalb über dünner Kleidung tragen.



### Warnhinweise:

#### Bei falscher Anwendung können selbst bei niedriger Temperatur Brandwunden entstehen.

Befolgen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und überwachen Sie die Anwendung in regelmäßigen Abständen. Sorgen Sie für eine Zirkulation der Luft über dem Wärmegürtel, um dem Risiko von Brandwundenbildung vorzubeugen. Um keinen Druck auf die behandelnde Stelle zu erzeugen, legen und setzen Sie sich nicht auf das Produkt und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Wärmegürtel. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn es unangenehm heiß wird, sich ein Hautausschlag bildet oder Sie sich nicht wohl fühlen. Personen, die den Wärmegürtel nicht eigenständig abnehmen können, z.B. ältere oder behinderte Personen, sollten während der Anwendung sorgfältig überwacht werden. Suchen Sie einen Arzt auf, sofern Ihre Schmerzen nach einwöchiger Anwendung des Produktes nicht gelindert wurden, da dies auf eine Erkrankung hinweisen könnte. Schwere Vorfälle sind dem Hersteller oder der zuständigen Behörde zu melden.

#### Nicht anwenden:

- Länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden
- Bei Kindern unter 12 Jahren
- An einer Stelle mit Entzündungen, Prellungen, Rötungen, Schwellungen, Hautrissen, Blutergüssen, Hautreizungen bzw. überempfindlicher, kranker, verletzter oder geschädigter Haut
- An einer Stelle, an der Sie Wärme nicht wahrnehmen können
- In Verbindung mit medizinischen und kosmetischen Cremes, Mitteln, Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden
- Wenn Personen das Produkt nicht selbst entfernen können
- Wenn das Produkt beschädigt oder undicht ist
- Im Schlaf
- Im MRT



#### Wärmepads niemals:

- Zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten, pressen
- In der Mikrowelle oder durch andere äußere Einwirkungen erwärmen
- Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen

#### Inhaltsstoffe:

Eisen, Wasser, Kieselerde, Aktivkohle, Natriumchlorid

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:

Telefon: +49(0) 22 41-2 34 06 00

E-Mail: [info@product-services.de](mailto:info@product-services.de)



Hersteller:

Koolcare Technology Co., Ltd.  
 Adr.: No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,  
 South Waihuan Road, Linyi, 276017, Shandong, China  
 Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,  
 Zhenbei Road, Xinyi, 221400, Jiangsu, China

Vertrieben durch:

PS Product Services GmbH  
 Alte Heerstraße 6  
 DE-53757 Sankt Augustin  
 Germany

Stand: REV/01 2023-08-01



Prolinx GmbH  
 Brehmstraße 56  
 DE-40239 Düsseldorf  
 Germany



Siehe Einzelverpackung

PS-LAN: WP0027



Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

## Menstruations-Wärmepflaster – Gebrauchsanweisung:

### Medizinprodukt

- Einfache und schnelle Hilfe zur Linderung von Menstruationsbeschwerden, Gelenk- und Muskelschmerzen, Muskelkater, Verspannungen, Rückenschmerzen und Zerrungen
- selbst erwärmend
- langanhaltende, gleichmäßige und wohltuende Wärme bis zu 12 Stunden lang
- tiefenwirksam und entspannend

### Inhalt:

- 8 Stück (ca. 20 x 10 cm) zur einmaligen Anwendung

### Zur lindernden Wärme-Therapie bei:

- Menstruationsbeschwerden
- Gelenk- und Muskelschmerzen
- Muskelkater
- Verspannungen
- Rückenschmerzen
- Zerrungen
- Muskelsteifheit

### Anwendung:

Säubern und trocknen Sie die Haut an der Anwendungsstelle. Öffnen Sie die luftdichte Verpackung mit den Händen erst unmittelbar vor der Anwendung (nicht mit Messer oder Schere etc.) und entnehmen Sie das Pflaster. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite ab und bringen Sie das Produkt mit der Klebseite entweder direkt auf der Haut oder auf der Slipinnenseite auf. Die Erwärmung erfolgt langsam und erreicht nach ca. 30 Minuten die maximale Temperatur, die über mindestens 12 Stunden bestehen bleibt. Die Wärme wird durch die Luft aktiviert, weshalb die luftdichte Verpackung erst unmittelbar vor Benutzung des Pflasters geöffnet werden sollte.

### Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei rheumatischen Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, Diabetes, Durchblutungsstörungen, Herzerkrankungen, rheumatoider Arthritis, Nervenschäden, Erkrankung der Sinnesfunktionen, Hauterkrankung oder einer Schwangeschaft **bitte unbedingt vor der Anwendung an einen Arzt wenden**
- Nur zur äußerlichen und zweckmäßigen Anwendung geeignet
- Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren
- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist
- Von der Haut sofort entfernen, wenn die Temperatur unangenehm ist
- Nicht zusammen mit schmerzstillenden Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden

- Menstruations-Wärmepflaster nur einmal benutzen



- Bei versehentlicher Einnahme des Inhalts, dem Kontakt mit der Haut oder den Augen das Produkt entfernen, den betroffenen Bereich mit Wasser spülen und vorsorglich umgehend einen Arzt aufsuchen. **Der Inhalt kann bei Verschlucken oder direktem Kontakt mit Augen und Haut schädlich sein.**

- Dauerhafte Lagerung bei Zimmertemperatur



- Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Einzelverpackung



- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.
- Falls nach der Anwendung eine leichte Rötung der Haut auftritt, was normal ist, diese erst abklingen lassen, bevor eine weitere Anwendung durchgeführt wird.
- Ab dem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Pflaster deshalb über dünner Kleidung tragen.



### Warnhinweise:

#### Bei falscher Anwendung können selbst bei niedriger Temperatur Brandwunden entstehen.

Befolgen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und überwachen Sie die Anwendung in regelmäßigen Abständen. Sorgen Sie für eine Zirkulation der Luft über dem Wärmepflaster, um dem Risiko von Brandwundenbildung vorzubeugen. Um keinen Druck auf die behandelnde Stelle zu erzeugen, legen und setzen Sie sich nicht auf das Produkt und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Wärmepflaster. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn es unangenehm heiß wird, sich ein Hautausschlag bildet oder Sie sich nicht wohl fühlen. Personen, die das Wärmepflaster nicht eigenständig abnehmen können, z.B. ältere oder behinderte Personen, sollten während der Anwendung sorgfältig überwacht werden. Suchen Sie einen Arzt auf, sofern Ihre Schmerzen nach einwöchiger Anwendung des Produktes nicht gelindert wurden, da dies auf eine Erkrankung hinweisen könnte. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller oder der zuständigen Behörde zu melden.

#### Nicht anwenden:

- Länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden
- Bei Kindern unter 12 Jahren
- An einer Stelle mit Entzündungen, Prellungen, Rötungen, Schwellungen, Hautrissen, Blutergüssen, Hautreizungen bzw. überempfindlicher, kranker, verletzter oder geschädigter Haut
- An einer Stelle, an der Sie Wärme nicht wahrnehmen können
- In Verbindung mit medizinischen und kosmetischen Cremes, Mitteln, Lotionen, die auf die Haut aufgetragen werden
- Wenn Personen das Produkt nicht selbst entfernen können
- Wenn das Produkt beschädigt oder undicht ist
- Im Schlaf
- Im MRT



#### Menstruations-Wärmepflaster niemals:

- Zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten, pressen
- In der Mikrowelle oder durch andere äußere Einwirkungen erwärmen
- Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen

#### Inhaltsstoffe:

Eisen, Wasser, Kieselerde, Aktivkohle, Natriumchlorid

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:

Telefon: +49(0)22 41-2 34 06 00

E-Mail: [info@product-services.de](mailto:info@product-services.de)



Hersteller:

Koolcare Technology Co., Ltd.  
Adr.: No. 6-10, A5, Shandong International Tech Park,  
South Waihuan Road, Linyi, 276017, Shandong, China  
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,  
Zhenbei Road, Xinyi, 221400, Jiangsu, China

Vertrieben durch:

PS Product Services GmbH  
Alte Heerstraße 6  
DE-53757 Sankt Augustin  
Germany

Stand: REV/01 2023-08-01



Prolix GmbH  
Brehmstraße 56  
DE-40239 Düsseldorf  
Germany



Siehe Einzelverpackung



PS-LAN: WP0027