

Der Prokudent Reinigungsschaum ist ideal für die komfortable und **materialschonende** Reinigung zwischendurch. Er enthält keine Schleifpartikel und kann somit **mehrmals täglich** angewendet werden.

Anwendung:

1. Flasche vor Gebrauch gut **schütteln**.
2. Flasche gerade oder bis 45° geneigt halten und den Schaum auf Prothese/Spange/Schiene auftragen.
3. Schaum 1-2 Minuten einwirken lassen.
4. Prothese/Spange/Schiene mit einer Zahn- oder Prothesenbürste gründlich **abbürsten** und mit klarem Wasser **Schaum vollständig abspülen**.
5. Zusätzlich 1x täglich die Prothese/Spange/Schiene mit Prokudent dritte Zähne Reinigungscreme oder Prokudent Gebissreiniger Tabs säubern.

Warnhinweise:

- Anwendungshinweise befolgen
- Schaum nur außerhalb des Mundes anwenden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Augenkontakt vermeiden
- Produkt nicht anwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden

Inhaltsstoffe: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCOLIPIDS, SODIUM BENZOATE, AROMA, CELLULOSE GUM, SODIUM SACCHARIN, L-MENTHOL, CITRIC ACID, SODIUM CARBONATE

125ml e



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
www.product-services.de
PS-LAN: ZR0047
Stand: REV1 2023-12-14

UDI 4050235003655

LOT LOT 22x4mm
MHD 22x4mm



HINWEIS:
MEDIZINPRODUKT

Vertrieb durch
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Str. 16
30938 Burgwedel
Germany
www.rossmann.de

RICHTIG TRENNEN
(GILT IN DE):

GELBE TONNE
Flasche & Deckel
getrennt entsorgen

REINIGUNGS- SCHAUM

- Lang anhaltende Frische
- Materialschonend

Für herausnehmbare
Zahnspangen
Zahnprothesen
Zahnschienen



Prokudent



ROSSMANN