

 Bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und zum Nachlesen aufbewahren!

Curafit

MEDIZINPRODUKT

Wärmepflaster

Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung

Tiefenwirksame und entspannende Wärmetherapie (bis zu 12h) zur vorübergehenden Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen; Überlastungsschmerzen, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

Inhaltsstoffe: Eisen, Wasser, Kieselgur, Aktivkohle, Natriumchlorid

Anwendung

- Säubern und trocknen Sie die Haut an der Stelle, an der Sie das Produkt anwenden möchten.
- Öffnen Sie den luftdichten Beutel mit den Händen (nicht mit einem Messer oder einer Schere etc.) erst unmittelbar vor der Anwendung, da das Produkt durch den Kontakt mit Luft aktiviert wird.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Produktes ab und kleben Sie das Produkt mit der Klebeseite fest auf die schmerzende Körperstelle auf und achten Sie auf faltenfreien Sitz, da sonst ein erhöhtes Verbrennungsrisiko besteht.
- Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis die therapeutische Temperatur erreicht ist.
- Für eine maximale Wirksamkeit empfehlen wir eine maximale Anwendungsdauer von 12 Stunden. Wenden Sie das Produkt nicht länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden an.
- Nach einmaligem Gebrauch Produkt entsorgen.


Indikationen

Wärmepflaster wurden zur Schmerzlinderung von Menstruationsbeschwerden, Muskel- und Gelenkschmerzen und Schmerzen, die mit Überanstrengungen, Belastungen, Verstauchungen und Arthritis verbunden sind sowie zur Schmerzlinderung bei Rückenschmerzen und Zerrungen entwickelt.

Kontraindikationen

Wärmepflaster sollten nicht von Personen mit eingeschränktem Temperaturempfinden oder von Personen mit Durchblutungsstörungen, Diabetes, Nervenschäden, Lähmungen oder empfindlicher Haut angewendet werden. Wärmepflaster sollten bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden und bei Kindern über 12 Jahren nur unter Aufsicht Erwachsener.


Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen

- **Dieses Produkt kann Verbrennungen verursachen.**
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern, Säuglingen und Tieren aufbewahren.**
- **Nicht in der Mikrowelle erwärmen.**
- Dieses Produkt ist ein Einmalprodukt. 
- Dieses Produkt kann bei Menschen mit empfindlicher Haut oder durch falsche Anwendung juckende Haut, rote Haut oder leichte Hautverbrennungen verursachen.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- Überprüfen Sie die Haut während der Anwendung regelmäßig (stündlich).
- Wenn Irritation oder Verbrennung auftritt, das Produkt umgehend entfernen.
- Fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt, wenn Sie Diabetes, eine schlechte Durchblutung, Herzerkrankungen, Kreislaufbeschwerden, rheumatische Erkrankungen, Nervenschäden, Hauterkrankungen oder rheumatoide Arthritis haben oder schwanger sind.
- Das Pulver im Inneren des Pflasters enthält Eisen und kann bei Hautkontakt oder Verschlucken schädlich sein. Bei versehentlichem Einnahme des Inhalts den Mund mit Wasser ausspülen und die Giftnotzentrale oder einen Arzt kontaktieren.
- Wenn der Inhalt des Wärmepflasters mit Haut oder Augen in Berührung kommt, den Bereich sofort mit Wasser spülen.
- Erwärmen Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle und versuchen Sie nicht, es erneut zu erwärmen, da die Pflaster Feuer fangen können.
- Ab einem Alter von 55 Jahren nimmt die Empfindlichkeit der Haut zu. Wärmepflaster bei entsprechender Empfindlichkeit über dünner Kleidung tragen.
- Das Produkt niemals zerschneiden, zerreißen, verbrennen, kneten oder mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Entsorgung des Produktes gemäß den örtlichen Vorschriften
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Bei Anwendung dieses Produktes

- Wenn Sie sich unwohl fühlen, die Temperatur als unangenehm empfinden, Reizungen, Ausschlag oder Verbrennungen feststellen, entfernen Sie das Produkt sofort.
- Wenn sich das Produkt zu heiß anfühlt, stoppen Sie die Anwendung und/oder tragen Sie das Pflaster über der Kleidung.
- Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus und tragen Sie keine enganliegende Kleidung über dem Produkt. Sorgen Sie dafür, dass immer etwas Luft an das Wärmepflaster gelangen kann.
- Vor einer MRT-Untersuchung Produkt entfernen.

Nicht anwenden

- Wenn das Pflaster undicht ist und/oder die Verpackung beschädigt oder gerissen ist. 
- Für mehr als zwölf Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum.
- In Verbindung mit Schmerzsalben, Schmerztabletten, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Auf geröteter, kranker, geschädigter oder verletzter Haut.
- An Stellen mit Blutergüssen oder Schwellungen, die innerhalb von 48 Stunden vor der geplanten Anwendung aufgetreten sind und an entzündeten Körperstellen.
- An Stellen des Körpers, an denen Sie Wärme nicht wahrnehmen können oder stark schwitzen.
- Bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.
- Zeitgleich mit anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Bei Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Bei Personen, die nicht in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.

Beenden Sie die Anwendung und fragen Sie einen Arzt

- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder länger als sieben Tage anhalten.
- Wenn Sie Beschwerden, Brennen, Schwellungen, Ausschlag oder andere Veränderungen an der Hautstelle bemerken, an der Sie das Pflaster getragen haben.

Halbbarkeit ab Produktion: 3 Jahre

Transport und Lagerung

Das Produkt bei Raumtemperatur in belüfteter Umgebung lagern und transportieren.

Inhalt: 2 Stück  à 13 x 9,5 cm

Vertrieb:
BUDNI Warehandels-Gesellschaft mbH,
22297 Hamburg, www.budni.de
Servicenummer: 040 80 60 30 30

EU-Importeur:
PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
DE-53757 St. Augustin
Germany
Tel.: 022412340600
info@product-services.de

 Koolcare Technology Co., Ltd.
Adr.: No. 6-10, A5,
Shandong International Tech Park,
South Waihuan Road, Linyi, 276017,
Shandong, China
Facility: Wenlv Healthcare Park, No.18,
Zhenbei Road, Xinyi, 221400, Jiangsu, China

 **EC REP**
Prolinx GmbH
Brehmstraße 56
DE-40239 Düsseldorf
Germany



Siehe
Einzelverpackung



Stand der Information: REV1/ 2024-05-01



Hersteller



Chargennummer



CE-Zeichen




Herstellungsdatum



Gebrauchsanweisung beachten



nicht wiederverwenden

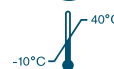

Lagerung bei -10°C +40°C



Bevollmächtigter der Europäischen Union



verwendbar bis



nicht verwenden, wenn die
Verpackung beschädigt ist



Achtung, siehe Gebrauchsanweisung



Medizinprodukt



eindeutige Produktidentifikationsnummer

FINAL ARTWORK: 20-EDK-0204
AW_EDK_CURAFIT_Waermepflaster_2Stk_BPZ

Kunde: EDEKA
Marke: CURAFIT
Verpackung: Beoipackzettel
Range/Sorte: Wärmepflaster
Anzahl/Menge: 2 Stück
Lieferant: PS Product Services
Material: Papier
Stanze: 145 x 210 mm
ZKS: 5263275
GTIN-Code:
Datum: **04.06.2024**

Druckverfahren: Offset
Max. Farben:
Min. EAN-Größe:
Min. Strichstärke: -

 PANTONE 3025 C



Dieses Artwork ist nicht final druckbar. Bitte legen Sie die Über- und Unterfüllungen bezogen auf das jeweilige Druckverfahren an. Bitte prüfen die das Artwork auf die festgelegten druckbaren Bereiche und druckfreien Zonen. Die eingefügte Stanze ist Layout. Bitte setzen Sie die Originalstanze ein.

Diese Vorlage darf ohne ausdrückliche Einwilligung von VISID GmbH & Co. KG weder kopiert noch vervielfältigt oder verändert werden. Eine Nutzung dieser Vorlage über den von VISID GmbH & Co. KGbestimmten Zweck hinaus ist rechtlich unzulässig und verstößt gegen das Urheberrecht. Es wird keine Haftung übernommen für etwaige orthografische Fehler, für Verletzungen des Wettbewerbs- und Urheberrechts sowie des Warenschutzgesetzes und daraus entstehende Folgeschäden. Prüfen Sie die Reinzeichnungen bitte in rechtlicher Hinsicht auf die Richtigkeit von Format und Abwicklung, und lesen Sie den gesamten Text Korrektur.

ACHTUNG:

- Bitte Originalstanze verwenden!
- Bitte legen Sie einen Schutzlack an (wenn gewünscht)
- Um eine ausreichende Opazität zu erzielen, empfehlen wir eine zweifach Druckweissunterdruckung
- Achtung: Bitte prüfen Sie alle Schatten bezgl. des Druckverfahrens und passen Sie diese ggf. an

Freigabe Box:

1. _____	2. _____
Datum:	Datum:
3. _____	4. _____
Datum:	Datum: