

diadent

SUPER HAFTCREME

MIT MINZGESCHMACK



▶ LANGER & STARKER HALT ▶ POLSTERUNGSEFFEKT ▶ KRÜMELSCHUTZ

MEDIZINPRODUKT

HINWEISE:

Bitte alle Hinweise sorgfältig lesen und beachten. Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben. Die Haftcreme außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Tubeninhalt und die Kanüle von Flüssigkeiten fernhalten und nach Gebrauch fest verschließen. Die Tube kühl und trocken aufbewahren. Die Haftcreme nicht verwenden, wenn gegen einen der genannten Inhaltsstoffe eine Überempfindlichkeit vorliegt. Die Faltschachtel zum Nachlesen aufbewahren. Den Sitz der Prothese regelmäßig vom Zahnarzt überprüfen lassen. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Schutz und Sicherheit für 3. Zähne

- ▶ Extra starker Halt und Schutz für Voll- und Teilprothesen
- ▶ Mit Polsterungseffekt und Krümelschutz
- ▶ Mit frischem Minzgeschmack

INGREDIENTS:

CELLULOSE GUM, HYDROGENATED POLYDECENE, CALCIUM/SODIUM PVM/ MA COPOLYMER, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, AROMA, TOCOPHEROL, LIMONENE.

ANWENDUNG:

- 1 Die Prothese gründlich reinigen und gegebenenfalls mit einer Bürste nacharbeiten.
- 2 Die Prothese vollständig abtrocknen.
- 3 Die Haftcreme in dünnen Streifen oder in Punkten entlang des Prothesenrands auftragen. Dabei ca. 1 cm Abstand vom Rand einhalten.
- 4 Die Prothese einsetzen und für ein paar Sekunden festdrücken. Für ca. 5 Minuten bitte nichts essen oder trinken.

Sollte nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme herausquellen, dann bitte bei der nächsten Anwendung die Menge reduzieren.

 etol
Gesundheitspflege-
und Pharmaprodukte GmbH,
Konrad-Adenauer-Straße 3,
D-77704 Oberkirch

Rückfragen: info@product-services.de
Tel. +49 2241 23406 00

Vertrieb:
EUCO GmbH,
D-22291 Hamburg
info@euco-online.de
Kontakt: 0800 333 5255



AUFBEWAHRUNG:

Tubenöffnung stets trocken halten. Nach Gebrauch Tube gut verschließen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

REV1/2024-02-01
PS-LAN: ZR0049

75g e