

elkos DentaMax

SUPER-HAFTCREME

EDEKA

- ▶ Langer & starker Halt
- ▶ Polsterungseffekt
- ▶ Krümelschutz
- ▶ Mit Minzgeschmack

MEDIZINPRODUKT

ANWENDUNG:



1. Die Prothese gründlich mit elkos DentaMax Gebissreiniger Tabs reinigen und gegebenenfalls mit einer Bürste nacharbeiten.
2. Die Prothese im Anschluss vollständig abtrocknen.
3. Die Haftcreme in dünnen Streifen oder Punkten entlang des Prothesenrands auftragen. Dabei ca. 1 cm Abstand vom Rand einhalten.
4. Die Prothese einsetzen und für einige Sekunden festdrücken.
5. Für ca. 5 Min. bitte nichts essen oder trinken.

Sollte nach dem Einsetzen der Prothese Haftcreme herausquellen, dann bitte bei der nächsten Anwendung die Menge reduzieren.

HINWEISE:

Bitte alle Hinweise sorgfältig lesen und beachten. Die Haftcreme nicht direkt in den Mund geben. Die Haftcreme außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Tubeninhalt und die Kanüle von Flüssigkeiten fernhalten und nach Gebrauch fest verschließen. Die Tube kühl und trocken aufbewahren. Die Haftcreme nicht verwenden, wenn gegen einen der genannten Inhaltsstoffe eine Überempfindlichkeit vorliegt. Die Faltschachtel zum Nachlesen aufbewahren. Lassen Sie den Sitz Ihrer Prothese regelmäßig beim Zahnarzt überprüfen. Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

INGREDIENTS: CELLULOSE GUM, HYDROGENATED POLYDECENE, CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER, HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER, AROMA, LIMONENE, TOCOPHEROL.

TIPP:

Zur Entfernung von Rückständen Tuch in Öl tränken und Prothese reinigen. Nach Gebrauch Tube gut verschließen. Tubenöffnung stets trocken halten. Für Veganer geeignet.

LAGERUNG:

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

EDEKA KUNDENSERVICE:

0800 333 5211 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz) oder info@edeka.de.

Informationen zu den abgebildeten Siegeln finden Sie unter edeka.de/siegel.

etol Gesundheitspflege- und Pharmaprodukte GmbH, Konrad-Adenauer-Straße 3, D-77704 Oberkirch

Rückfragen:
info@product-services.de
Tel. +49 2241 23406 00

Vertrieb: EDEKA ZENTRALE
Stiftung & Co. KG, D-22291 Hamburg

