

SLEEVE-BANDAGE

zur 360° Kalt-Warmtherapie



zur Regeneration nach körperlicher Anstrengung
rundum Kälte- oder Wärmetherapie bei voller Bewegungsfreiheit
einfach und direkt auf der Haut anwendbar, rutschfest
auslaufsicheres, flexibles Spezialgel, langlebig
und wiederverwendbar



Sleeve-Bandage zur 360° Kalt-Warmtherapie

 **Verwendungszweck / Indikation:** Die Sleeve-Bandage ist ausschließlich zur äußeren Anwendung auf unverletzter Haut und nur für den privaten Gebrauch konzipiert. Sie kann an allen Gelenken (Hand, Fuß, Knie, Elle) und an beiden Armen und Beinen angewendet werden.

Anwendung:

Zur Kälte-Therapie bei:

- entzündlichen Gelenk- und Sehnenproblemen wie beispielsweise Tennis- / Golferellenbogen
- Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Blutergüssen
- zur Regeneration nach Belastung

Die Sleeve-Bandage für min. 2 Stunden bei min. -15 °C im (beiliegenden), verschlossenen Beutel im Gefrierschrank aufbewahren. Die Sleeve-Bandage aus dem Beutel entnehmen und eventuell vorhandene Feuchtigkeit abwischen. Anschließend über die gewünschte Körperpartie ziehen.

Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten und kann nach 30 Minuten Pause wiederholt werden.

Zur Wärme-Therapie bei:

- Muskelkater
- Muskelschmerzen
- Verspannungen
- zur Regeneration nach Belastung

Die Sleeve-Bandage ohne Beutel in der Mikrowelle bei max. 600 Watt für 30 Sek. erwärmen. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Ist die Komresse noch nicht warm genug, dann in 15 Sek. Intervallen in der Mikrowelle weiter erwärmen. Die Sleeve-Bandage sollte sich warm, aber nicht heiß anfühlen.

Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten und kann nach 30 Minuten Pause wiederholt werden.

Die Sleeve-Bandage nach der Anwendung mit einem feuchten Tuch abwischen und vollständig abtrocknen lassen. Anschließend in einem verschlossenen Beutel aufbewahren.

Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen!

- Sleeve-Bandage sofort entfernen, wenn die Temperatur als unangenehm empfunden wird
- Sleeve-Bandage nicht zeitgleich mit schmerzstillenden Medikamenten / Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden
- Bei rheumatischen Erkrankungen und Kreislaufbeschwerden bitte vor Anwendung einen Arzt konsultieren
- Die Wärmeanwendung nicht bei entzündlichen Prozessen anwenden
- Zu starkes Erhitzen kann die Sleeve-Bandage beschädigen und zu Hautverbrennungen führen
- Bei versehentlicher Einnahme des Spezialgels viel Wasser trinken und vorsorglich einen Arzt konsultieren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet
- Nicht verwenden, wenn die Sleeve-Bandage beschädigt ist
- Die Sleeve-Bandage kann dauerhaft bei Zimmertemperatur in einem luftdichten Beutel gelagert werden
- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden

Chemische Zusammensetzung:

Füllung: Glycerol, Wasser, Sodium Acrylat / Acrylamid Copolymer, Konservierungsstoffe

Bandagenstoff: Polyester mit Elasthan



Umfang 30 - 35 cm



Umfang 35 - 40 cm



Umfang 40 - 45 cm



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
DE-53757 Sankt Augustin
Deutschland

www.product-services.de
info@product-services.de

PS-LAN: TS0086KW
Stand der Information:
REV/1 2025-11-01



KALT-/WARMKOMPRESSEN

mit Fixierbandage



für alle Körperpartien

Fixierbandage individuell einstellbar

zur wärmenden Anwendung bei Muskelschmerzen
und Verspannungen

zur kühlenden Anwendung bei Prellungen, Zerrungen
und Verstauchungen



Warnhinweise beachten!



Verwendungszweck / Indikation: Die Komresse ist ausschließlich zur äußeren Anwendung auf unverletzter Haut und nur für den privaten Gebrauch konzipiert. Sie ist zur Kälte-Therapie, z.B. bei Prellungen, leichten Verbrennungen, Zahn- und Kopfschmerzen und zur Wärme-Therapie, z.B. bei Muskelkater, Verspannungen und leichten Unterkühlungen geeignet.

Anwendung:

Zur Kälte-Therapie bei:

- Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Blutergüssen
- leichten Verbrennungen / Verbrühungen
- Fieber
- Sonnenstich
- Zahn- und Kopfschmerzen
- Insektenstichen

Die Komresse für min. 2 Stunden bei min. -15 °C ohne Fixierbandage im Gefrierschrank aufbewahren.
Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren.
Um Kälteschäden vorzubeugen, die Komresse anschließend in die Schutzhülle der Fixierbandage legen.
Nie ohne Schutzhülle oder Tuch anwenden.
Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten und kann nach 30 Minuten Pause wiederholt werden.

Zur Wärme-Therapie bei:

- Muskelkater, Muskelschmerzen
- Verspannungen
- Hexenschuss, Rückenschmerzen
- Menstruationsbeschwerden
- Nackenschmerzen
- Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen, Darmträgheit
- leichten Unterkühlungen

Die Komresse für 5-10 Minuten in max. +80 °C heißem Wasser erwärmen, alternativ in einem trockenen Tuch bei max. 600 Watt für 20 Sek. in der Mikrowelle aufwärmen. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Ist die Komresse noch nicht warm genug, dann erneut im Wasserbad erwärmen bzw. in 20 Sek. Intervallen in der Mikrowelle.

Um Wärmeschäden vorzubeugen, die Komresse anschließend in die Schutzhülle der Fixierbandage legen. Nie ohne Schutzhülle oder Tuch anwenden.

Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten und kann nach 30 Minuten Pause wiederholt werden.

Die Komresse mit der Netzseite zur Haut an der schmerzenden Stelle anbringen und mit dem Klettverschluss am Gurt oder der Hülle fixieren. Den Elastikgurt niemals so stramm schnüren, dass die Durchblutung gestört wird.



Warnhinweise / Vorsichtsmaßnahmen!

- Komresse sofort entfernen, wenn die Temperatur als unangenehm empfunden wird
- Komresse nicht zeitgleich mit schmerzstillenden Medikamenten / Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden
- Bei rheumatischen Erkrankungen und Kreislaufbeschwerden bitte vor Anwendung einen Arzt konsultieren
- Die Wärmeanwendung nicht bei entzündlichen Prozessen anwenden
- Zu starkes Erhitzen kann die Komresse beschädigen und zu Hautverbrennungen führen
- Bei versehentlicher Einnahme des Beutelinhalts viel Wasser trinken und vorsorglich einen Arzt konsultieren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet
- Nicht verwenden, wenn die Komresse beschädigt ist.
- Die Komresse kann dauerhaft bei Zimmertemperatur (aus hygienischen Gründen in einem luftdichten Gefrierbeutel) gelagert werden.

- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Waschhinweise:

Die Fixierbandage besteht aus Polyester. Diese vor dem ersten Tragen mit der Hand waschen und dann jeweils nach 2-3-maliger Anwendung. Flachliegend trocknen.
Die Komresse nicht mit Lösungsmitteln, wie z.B. Desinfektionsmitteln, sondern nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

Chemische Zusammensetzung

Füllung: Wasser, Glycerol, CMC (Natrium Carboxymethylcellulose), Konservierungsstoffe, Bitterstoffe
Kompressenhülle: Polyethylen



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
DE-53757 Sankt Augustin
Deutschland
www.product-services.de
info@product-services.de

PS-LAN: TS0086KW
Stand der Information:
REV/1 2025-11-01

