

Curafit^{PLUS}

MEDIZINPRODUKT

Kalt-/Warm-Kompresse

- Wärmende Anwendung z.B. bei Verspannungen, Muskelschmerzen, Rücken- und Bauchschmerzen
- Kühlende Anwendung z.B. bei Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen und Fieber
- Wiederverwendbar



1 Kompresse (15,5 cm x 13 cm)

ANWENDUNG:

Kompresse zur äußerlichen Anwendung im privaten Bereich.

Zur Kälte-Therapie bei:

- Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Blutergüssen
- Sonnenstich
- Fieber
- leichten Verbrennungen/Verbrühungen
- Insektenstichen
- Zahn- und Kopfschmerzen

Die Kompresse für etwa 2 Stunden bei mindestens -15°C im Gefrierschrank/-fach aufbewahren. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten. Die Anwendung kann nach einer 30 minütigen Pause wiederholt werden.

Zur Wärme-Therapie bei:

- Muskelkater, Muskelschmerzen
- Hexenschuss, Rückenschmerzen
- Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen
- leichten Unterkühlungen
- Verspannungen
- Menstruationsbeschwerden
- Darmträgheit

Die Kompresse für 8 Minuten in maximal +80°C heißem Wasser erwärmen. Alternativ in einem trockenen Tuch eingeschlagen bei maximal 600 Watt für 15 Sekunden in der Mikrowelle aufwärmen. Die Temperatur vorsichtig mit der Hand kontrollieren. Ist die Kompresse noch nicht warm genug, dann erneut im Wasserbad bzw. in 15 Sekunden Intervallen in der Mikrowelle erwärmen. Die maximale Anwendungszeit beträgt 20-30 Minuten. Die Anwendung kann nach einer 30 minütigen Pause wiederholt werden.

WARNHINWEISE:

- Die Wärmeanwendung nicht bei entzündlichen Prozessen anwenden.
- Zu starkes Erhitzen kann die Kompresse beschädigen und zu Hautverbrennungen führen.
- Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Nicht verwenden, wenn die Kompresse beschädigt ist.
- Kompresse sofort entfernen, wenn die Temperatur als unangenehm empfunden wird.
- Kompresse nicht zugleich mit schmerzstillenden Medikamenten/Mitteln und bei eingeschränktem Temperaturempfinden sowie bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom verwenden.
- Bei rheumatischen Erkrankungen und Kreislaufbeschwerden bitte vor Anwendung einen Arzt konsultieren.
- Bei versehentlicher Einnahme des Beutelinhalts viel Wasser trinken und vorsorglich einen Arzt konsultieren.
- Die Kompresse kann dauerhaft bei Zimmertemperatur gelagert werden.
- Die Entsorgung kann über den Hausmüll erfolgen.
- Die Kompresse nicht mit Lösungsmitteln (z.B. Desinfektionsmittel) reinigen.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG:

Füllung: Wasser, Glycerol, CMC (Natrium Carboxymethylcellulose), Bitterstoffe, Konservierungsstoffe

Hülle des Gelpads: Polyethylen

Stand der Information:
REV3 2026-03-10 PS-LAN: TS0088



(01) 06959793314112
(17) 30-07-01
(21) 2025-07-01



Siehe
Einzelverpackung



PS Product Services GmbH
Alte Heerstraße 6
D-53757 Sankt Augustin
www.product-services.de

Vertrieb:
EUCO GmbH, D-22291 Hamburg
5263275